

Heartworm antigen - Anaplasma - Borrelia Burgdorferi - Ehrlichia protilátky

Testovací sada pro detekci antigenu a protilátek

truRapid FOUR

jen pro veterinární použití

PRINCIP TESTU

TruRapid FOUR test je rychlý test k detekci antigenu srdcových červů; protilátek proti *Borrelia burgdorferi*; *Anaplasma phagocytophilum* a *platys*; *Ehrlichia canis*, *chaffeensis*, a *ewingii* ve psím séru, plazmě, příp antikoagulované plné krvi.

OBSAH SOUPRAVY

- Testovací destička (10 anebo 25)
- Pipety (10 anebo 30)
- Tlumivý roztok (1 - 2 x 5 ml)- modrý uzávěr
- Návod k použití

SKLADOVÁNÍ

- Souprava by měla být skladována při teplotě 2-30°C.
- Zabraňte zamrznutí.
- Vyhněte se skladování na přímém slunci.

UPOZORNĚNÍ

- Jen pro veterinární použití.
- Pro každý testovaný vzorek použijte novou testovací destičku a pipetu.
- Použijte pouze pipetu dodanou se sadou.
- Nepoužívejte po datu expirace soupravy.

VZORKY

- Použitelnými typy vzorků jsou psí sérum, plazma a antikoagulovaná (EDTA nebo heparin) plná krev.
- Vzorky musí mít pokojovou teplotu a musí být jemně promíchány před testováním.
- Vzorky by měly být testovány čerstvé nebo uchovávány v chladničce při teplotě 2-8°C do jednoho týdne.
- Při delším skladování lze uchovávat vzorky séra nebo plazmy při -20°C. Zmrazené vzorky by se měly před použitím odstředit.
- Vyhněte se silně hemolyzovaným nebo kontaminovaným vzorkům. Lipemické vzorky neovlivní výsledky testu.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

- Soupravu a všechny vzorky, které budou testovány, přeneste do pokojové teploty přibližně 30 minut před testováním.
- Vyjměte testovací destičku z ochranného sáčku a položte ji vodorovně na rovném povrchu.
- Pomocí dodané pipety nakapejte vertikálně 1 kapku vzorku do jamky na vzorek bez dotyku pipety testovací destičky. Nechte vzorek absorbovat.

1 x (do každé jamky)

Přidejte 2 kapky tlumivého roztoku vertikálně do jamky na vzorek.

X 2 (do každé jamky)

Výsledky odečtete po 10 minutách.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

- Test je pozitivní, pokud jsou při značkách Heartworm (H), Lyme (L), Anaplasma (A) a Ehrlichia (E) a v kontrolních liniích (C) přítomny růžové/fialové čáry různé intenzity.

- Test je negativní, je-li přítomna jen kontrolní čára.

Pozitivní

Negativní

- Test je neplatný, pokud se na kontrolní linii neobjeví žádná čára, i když na testovací linii je přítomna čára.

- Všechny výsledky by měly být interpretovány v kontextu všech dostupných klinických a diagnostických informací.

Klíč symbolů

Spotřebujte do data

Kód šarže (šarže)

Sériové číslo

Katalogové číslo

Omezení teploty

Viz návod k použití

Výrobce

Dostatečné pro <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA

US: 800.464.3752 | www.heska.com

INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com