

Psia Leishmania
Testovacia súprava na detekciu protilátok

truRapid Leishmania

len na veterinárne použitie

PRINCÍP TESTU

TruRapid Leishmania test je rýchly test na detekciu protilátok na *Leishmania* v psom sére, plazme alebo antikoagulovanej plnej krvi.

OBSAH SÚPRAVY

- Testovacia doštička (10)
- Pipeta (10)
- Tlmivý roztok (5 ml) - modrý vrchnák
- Návod na použitie

SKLADOVANIE

- Súprava by sa mala skladovať pri teplote 2-30°C.
- Zabráňte zamrznutiu.
- Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnku.

UPOZORNENIA

- Len na veterinárne použitie.
- Pre každú testovanú vzorku použite novú testovaciu doštičku a pipetu.
- Použite iba pipetu dodanú so súpravou.
- Nepoužívajte po dátume exspirácie súpravy.

VZORKY

- Použiteľné typy vzoriek sú psie sérum, plazma a antikoagulovaná (EDTA alebo heparín) plná krv.
- Vzorky musia mať izbovú teplotu a musia byť jemne premiešané pred testovaním.
- Vzorky by mali byť testované čerstvé alebo uchovávané v chladničke pri teplote 2-8°C do jedného týždňa.
- Pri dlhšom skladovaní je možné uchovávať vzorky séra alebo plazmy pri -20°C. Zmrazené vzorky by sa mali pred použitím odstrediť.
- Vyhnite sa silne hemolyzovaným alebo kontaminovaným vzorkám. Lipemické vzorky neovplyvnia výsledky testu.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

- Súpravu a všetky vzorky, ktoré budú testované, preneste do izbovej teploty približne 30 minút pred testovaním.
- Vyberte testovaciu doštičku z ochranného vrečka a položte ju vodorovne na rovnom povrchu.
- Pomocou dodanej pipety nakvapkajte vertikálne 1 kvapku vzorky do jamky na vzorku bez dotyku pipety testovacej doštičky. Nechajte vzorku absorbovať.

Pridajte 2 kvapky tlmivého roztoku vertikálne do jamky na vzorku.

Výsledky odčítajte po 10 minútach.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

- Test je pozitívny, ak sú prítomné dve čiary (kontrolná čiara a testovacia čiara).
 - Test je negatívny, ak je prítomná len kontrolná čiara.
 - Test je neplatný, ak sa na kontrolnej línii neobjaví žiadna čiara, aj keď na testovacej línii je prítomná čiara.
- Všetky výsledky by sa mali interpretovať v kontexte všetkých dostupných klinických a diagnostických informácií.

Kľúč symbolov

Spotrebujte do dátumu
Kód šarže (šarže)
Sériové číslo
Katalógové číslo

Obmedzenie teploty
Pozrite si návod na použitie
Výrobca
Dostatočné pre <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA
US: 800.464.3752 | www.heska.com
INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com