

# **Psí Parvovírus, Giardia a psí koronavírus**

## **Testovacia súprava na detekciu antigénu**

**truRapid Parvovirus**  
**Giardia**  
**Coronavirus**

### **len na veterinárne použitie**

#### **PRINCÍP TESTU**

TruRapid Parvo/Giardia/CCV test je rýchly test na detekciu antigénu *psieho parvovírusu, cyst giardií a psieho koronavírusu* v psej stolici.

#### **OBSAH SÚPRAVY**

- Testovacia doštička (5)
- Vatový tampón (5)
- Extrakčný tlmivý roztok (5 x 1,2 ml) - tmavomodrý vrchnák
- Návod na použitie

#### **SKLADOVANIE**

- Súprava by mala byť skladovaná pri teplote 2-30°C.
- Zabráňte zamrznutiu.
- Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnku.

#### **UPOZORNENIA**

- Len na veterinárne použitie.
- Pre každú testovanú vzorku použite nový vatový tampón a testovaciu doštičku.
- Nepoužívajte po dátume expirácie súpravy.
- V extrakčnom tlmivom roztoku sa môžu tvoriť zrazeniny, ktoré ale výsledky testu neovplyvnia.

#### **VZORKY**

- Použiteľné typy vzoriek sú psie výkaly.
- Vzorky musia mať izbovú teplotu.
- Vzorky by mali byť testované čerstvé alebo uchovávané v chladničke pri teplote 2-8°C max do jedného týždňa.
- Pre dlhšie skladovanie môžu byť vzorky skladované pri -20°C

#### **NÁVOD NA POUŽÍVANIE**

1. Súpravu a všetky vzorky, ktoré budú testované, preneste do izbovej teploty približne 30 minút pred testovaním.
2. Odskrutkujte uzáver z tlmivého roztoku na extrakciu vzoriek.
3. Pokryte dodaný tampón tenkou vrstvou fekálneho materiálu. Pokúste sa nasýtiť tampón tekutinou, ak je prítomná.
4. Ponorte tampón so vzorkou do tlmivého roztoku na extrakciu vzorky a zakrúžte tampónom v tlmivom roztoku.

5.Odlomte prevyšujúcu časť tampónu o ústie nádobky a vatový tampón nechajte vo vnútri. Zvyšok tampónu zlikvidujte.

6. Nasadte uzáver na nádobku a odlomte hrot.

7. Vyberte testovaciu doštičku z ochranného vrečka a položte ju vodorovne na rovný povrch.

8. Držte extrakčnú nádobku vo zvislej polohe, naneste tri kvapky do jamky na vzorku v doštičke a počkajte 10 minút.

**X 3 (do každej jamky)**

#### **INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV**

- Test je pozitívny, ak sú prítomné dve čiary (kontrolná čiara a testovacia čiara).

- Test je negatívny, ak je prítomná len kontrolná čiara.

Pozitívny

Negatívny

- Test je neplatný, ak sa na kontrolnej línii neobjaví žiadna čiara, aj keď na testovacej línii je prítomná čiara.

- Všetky výsledky by sa mali interpretovať v kontexte všetkých dostupných klinických a diagnostických informácií.

#### **Kľúč symbolov**

Spotrebujte do dátumu

Kód šarže (šarže)

Sériové číslo

Katalógové číslo

Obmedzenie teploty

Pozrite si návod na použitie

Výrobca

Dostatočné pre <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA

US: 800.464.3752 | [www.heska.com](http://www.heska.com)

INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | [www.scilvet.com](http://www.scilvet.com)