

Giardia

Testovacia súprava na detekciu antigénu

truRapid Giardia

len na veterinárne použitie

PRINCÍP TESTU

TruRapid Giardia test je rýchly test na detekciu antigénu *cýst giardií* v psej a mačacej stolici.

OBSAH SÚPRAVY

- Testovacia doštička (5)
- Vatový tampón (5)
- Extrakčný tlmivý roztok (5 x 1,2 ml) - tmavomodrý vrchnák
- Návod na použitie

SKLADOVANIE

- Súprava by mala byť skladovaná pri teplote 2-30°C.
- Zabráňte zamrznutiu.
- Vyhnite sa skladovaniu na priamom slnku.

UPOZORNENIA

- Len na veterinárne použitie.
- Pre každú testovanú vzorku použite nový vatový tampón a testovaciu doštičku.
- Nepoužívajte po dátume expirácie súpravy.
- V extrakčnom tlmivom roztoku sa môžu tvoriť zrazeniny, ktoré ale výsledky testu neovplyvnia.

VZORKY

- Použiteľné typy vzoriek sú psie a mačacie výkaly.
- Vzorky musia mať izbovú teplotu.
- Vzorky by mali byť testované čerstvé alebo uchovávané v chladničke pri teplote 2-8°C max do jedného týždňa.
- Pre dlhšie skladovanie môžu byť vzorky skladované pri -20°C

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

1. Súpravu a všetky vzorky, ktoré budú testované, preneste do izbovej teploty približne 30 minút pred testovaním.
2. Odskrutkujte uzáver z tlmivého roztoku na extrakciu vzoriek.
3. Pokryte dodaný tampón tenkou vrstvou fekálneho materiálu. Pokúste sa nasýtiť tampón tekutinou, ak je prítomná.
4. Ponorte tampón so vzorkou do tlmivého roztoku na extrakciu vzorky a zakrúžte tampónom v tlmivom roztoku.
5. Zalomite prevyšujúcu časť tampónu o ústie nádoby a vatový tampón nechajte vo vnútri. Zvyšok tampónu zlikvidujte.

6. Nasaďte uzáver na nádobku a odlomte hrot.
7. Vyberte testovaciu doštičku z ochranného vrečka a položte ju vodorovne na rovný povrch.
8. Držte extrakčnú nádobku vo zvislej polohe, naneste tri kvapky do jamky na vzorku v doštičke a počkajte 10 minút.

X 3 (do každej jamky)

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

- Test je pozitívny, ak sú prítomné dve čiary (kontrolná čiara a testovacia čiara).
- Test je negatívny, ak je prítomná len kontrolná čiara.
- Test je neplatný, ak sa na kontrolnej línii neobjaví žiadna čiara, aj keď na testovacej línii je prítomná čiara.
- Všetky výsledky by sa mali interpretovať v kontexte všetkých dostupných klinických a diagnostických informácií.

Kľúč symbolov

Spotrebujte do dátumu
Kód šarže (šarže)
Sériové číslo
Katalógové číslo

Obmedzenie teploty
Pozrite si návod na použitie
Výrobca
Dostatočné pre <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA
US: 800.464.3752 | www.heska.com
INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com