

Psí Parvovirus a Giardia

Testovací sada pro detekci antigenu

truRapid Parvovirus Giardia

jen pro veterinární použití

PRINCIP TESTU

TruRapid Parvo/Giardia test je rychlý test k detekci antigenu na psí parvovirus, cyst giardií ve fekáliích.

OBSAH SOUPRAVY

- Testovací destička (5)
- Vatový tampon (5)
- Tlumivý roztok na extrakci vzorku (5 x 1,2 ml) - tmavomodrý uzávěr
- Návod k použití

SKLADOVÁNÍ

- Souprava by měla být skladována při teplotě 2-30°C.
- Zabraňte zamrznutí.
- Vyhněte se skladování na přímém slunci.

UPOZORNĚNÍ

- Jen pro veterinární použití.
- Pro každý testovaný vzorek použijte nový vatový tampon a testovací destičku.
- Nepoužívejte po datu expirace soupravy.
- V extrakčním tlumivém roztoku mohou vznikat sraženiny, které ale nikterak výsledky testu neovlivňují.

VZORKY

- Použitelnými typy vzorků jsou psí fekálie.
- Vzorky musí mít pokojovou teplotu.
- Vzorky by měly být testovány čerstvé nebo uchovávány v chladničce při teplotě 2-8°C do jednoho týdne.
- Při delším skladování lze uchovávat vzorky při -20°C.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

1. Soupravu a všechny vzorky, které budou testovány, přeneste do pokojové teploty přibližně 30 minut před testováním.
2. Odšroubujte uzávěr z tlumivého roztoku pro extrakci vzorků.
3. Pokryjte dodaný tampon tenkou vrstvou fekálního materiálu. Pokuste se nasytit tampon tekutinou, je-li přítomna.
4. Ponořte tampon se vzorkem do tlumivého roztoku k extrakci vzorku a zakružte tamponem v tlumivém roztoku.
5. Zlomte přebytečnou část tamponu o ústí nádoby a vatový tampon nechte uvnitř. Zbytek tamponu zlikvidujte.
6. Nasaďte uzávěr na nádobku a odlomte hrot.

7. Vyjměte testovací destičku z ochranného sáčku a položte ji vodorovně na rovný povrch.

8. Držte extrakční nádobku ve svislé poloze, naneste tři kapky do jamky na vzorek v destičce a počkejte 10 minut.

X 3 (do každé jamky)

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

- Test je pozitivní, jsou-li přítomny dvě čáry (kontrolní čára a testovací čára) na tom samém stripu testu (parvovirus antigen anebo giardia antigen pozitivní).
- Test je negativní, je-li přítomna jen kontrolní čára.

CPV pozitivní
Giardia pozitivní
Oba pozitivní
Oba negativní

• Test je neplatný, pokud se v kontrolní linii neobjeví žádná čára, i když na testovací linii je přítomna čára.

• Všechny výsledky by měly být interpretovány v kontextu všech dostupných klinických a diagnostických informací.

Klíč symbolů

Spotřebujte do data
Kód šarže (šarže)
Sériové číslo
Katalogové číslo

Omezení teploty
Viz návod k použití
Výrobce
Dostatečné pro <n> testy

Heska Corporation | 3760 Rocky Mtn Ave | Loveland CO 80538 USA

US: 800.464.3752 | www.heska.com

INT: +49 (0) 6204 78 90 222 | www.scilvet.com